

ReSound LiNX™

Mode d'emploi du ReSound LiNX sur votre iPhone



Made for
iPod iPhone iPad



ReSound



rediscover hearing

Manuel d'installation et d'utilisation rapide de la fonctionnalité Made For iPhone (MFi)

Appareils compatibles

La fonctionnalité MFi de ReSound LiNX est possible sur les appareils Apple suivants :

- iPhone® 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPad® Air
- iPad 4^e génération
- iPad mini avec écran Retina
- iPad mini
- iPod touch® 5^e génération

Pour les appareils auditifs dotés de MFi, vous avez besoin d'iOS 7.X ou d'une version plus récente.

Couplement et connexion de vos appareils ReSound LiNX à votre iPhone, iPad ou iPod touch

Vous pouvez maintenant coupler vos appareils auditifs ReSound LiNX.

Couplement de vos appareils auditifs à un appareil Apple compatible

Dans un premier temps, vérifiez que vos appareils auditifs ReSound LiNX sont pourvus de piles neuves. Attendez avant de fermer le compartiment des piles.


1. Activez la fonction Bluetooth de votre Apple.
2. **Passez au menu Réglages > Général. Sélectionnez l'option Accessibilité** dans le menu Général.
3. Allumez vos appareils auditifs ReSound LiNX en fermant le compartiment des piles.
4. Sélectionnez l'option **Appareils auditifs** dans le menu Accessibilité sur l'appareil Apple.
5. Si vous ouvrez l'écran Appareils auditifs, vous verrez le nom de votre appareil auditif affiché à côté du nom de la marque ReSound et du numéro de modèle.

6. Touchez du doigt le nom de votre appareil auditif qui s'affiche sur l'écran.
7. Il vous est alors demandé si vous souhaitez jumeler votre iPhone, iPad ou iPod touch. Appuyez sur « Jumeler » pour lancer le processus de couplage de votre appareil auditif ReSound LiNX. Attention : pour pouvoir jumeler deux appareils, deux demandes séparées de couplage sont nécessaires.
8. Votre iPhone, iPad ou iPod touch détecte maintenant les appareils auditifs ReSound LiNX que vous avez couplés et établit automatiquement la connexion.

Important : le premier couplage est accompagné d'une procédure de vérification MFi. **DURANT CETTE VÉRIFICATION, NE LANCEZ AUCUN STREAMING VERS LE RESOUND LINX APRÈS AVOIR CONFIRMÉ LA DEMANDE DE COUPLAGE.** Vous pouvez contrôler si cette procédure est terminée de deux façons différentes.

- Placez les appareils auditifs dans vos oreilles pendant que la procédure de vérification est en cours. Lorsque le processus de couplage est terminé, vous entendez une série de six tonalités courtes puis d'une plus longue. Vous entendrez ceci deux fois si vous avez couplé deux appareils.
- Ou bien attendez plus de 60 secondes pour être certain que le processus est terminé.

Étape 2

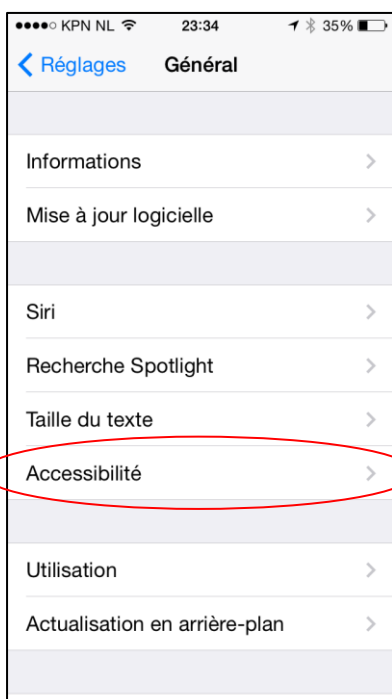


Étape 3

Allumez vos
appareils auditifs



Étape 4

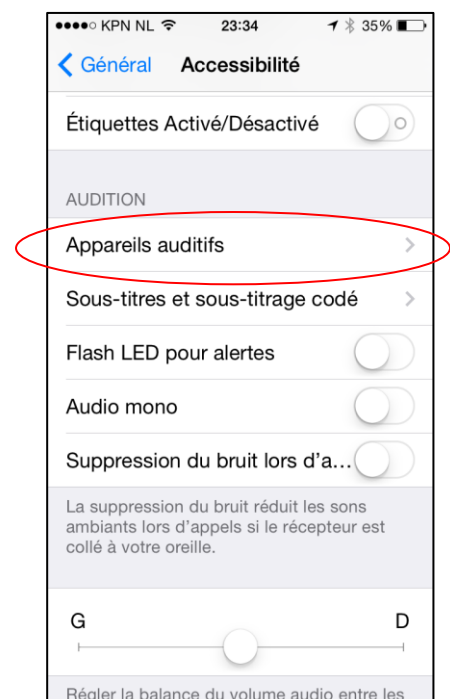


Étape 5



Étapes 6 et 7



Étape 8

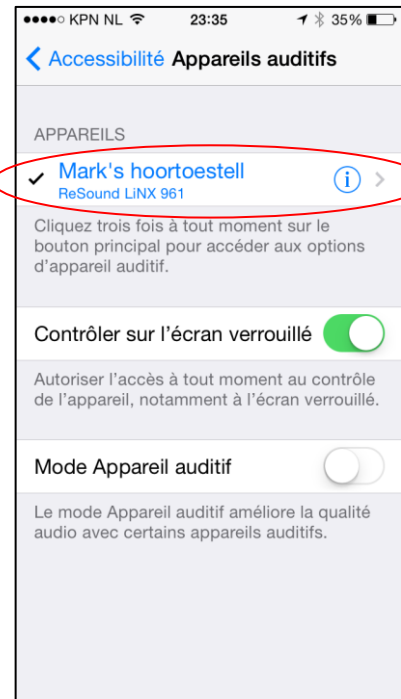

Établir de nouveau une connexion avec votre appareil Apple


Si vous éteignez vos appareils auditifs ou votre Apple, la connexion est interrompue. Pour rétablir la connexion, vous devez allumer vos appareils auditifs en ouvrant et refermant le compartiment des piles. Les appareils auditifs ReSound LiNX établiront alors automatiquement la liaison avec votre iPhone, iPad ou iPod touch.

Couplement avec plus d'un appareil Apple


Vous pouvez jumeler vos appareils auditifs ReSound LiNX avec maximum 5 appareils Apple différents en suivant la procédure décrite ci-dessous. Toutefois, vous ne pouvez établir la connexion qu'avec un seul appareil Apple à la fois. Pour pouvoir établir la connexion avec un autre appareil, vous devrez mettre fin à la communication avec l'appareil Apple en cours d'utilisation.

Streaming direct depuis votre iPhone, iPad, iPod touch vers votre appareil auditif ReSound LiNX

1. Si vous écoutez de la musique avec le lecteur multimédia ou avec une autre application sur votre iPhone, iPad ou iPod touch, vous pouvez envoyer directement cette musique à vos appareils auditifs ReSound LiNX connectés. Sélectionnez les appareils auditifs en tant que source à l'aide d'AirPlay® et lancez le streaming. Vous pouvez régler le volume sonore avec la barre coulissante ou les boutons de réglage du volume de votre appareil Apple.

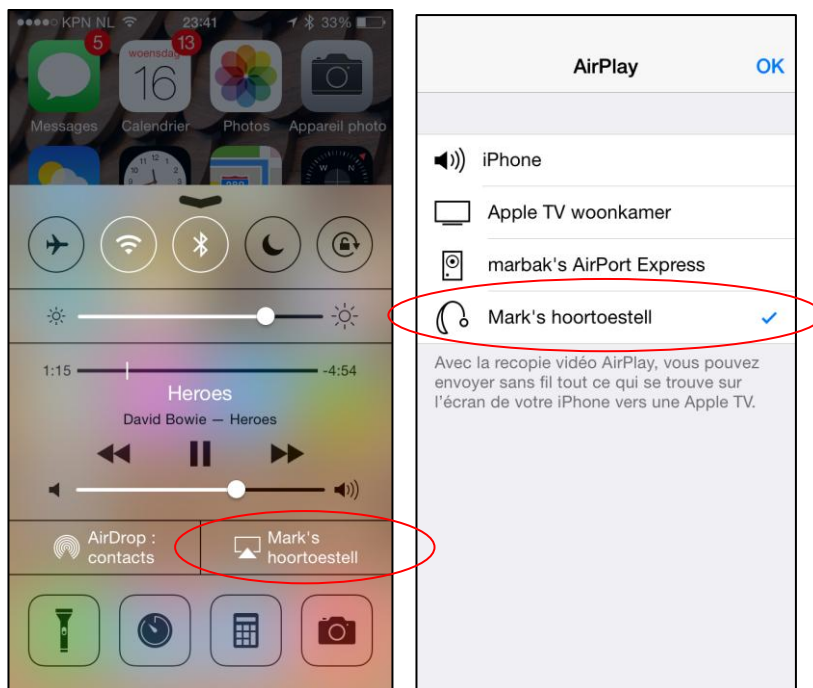

2. Avec ReSound LiNX et votre iPhone, iPad, ou iPod touch, vous pouvez également transférer le son de vos conversations téléphoniques ou FaceTime® vers vos appareils auditifs. Lancez le streaming vers les appareils auditifs sélectionnés et, lorsque la conversation est terminée, retournez au mode de fonctionnement normal de ReSound LiNX.

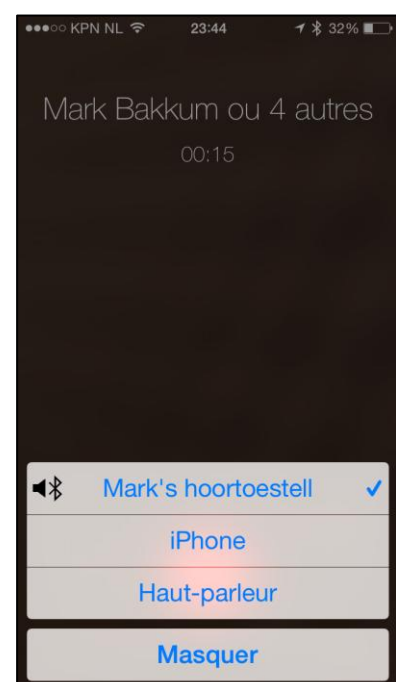

Commander votre ReSound LiNX depuis l'iPhone, iPad ou iPod touch

Si vos appareils auditifs ReSound LiNX sont connectés, vous pouvez les commander directement depuis votre iPhone, iPad ou iPod touch. Ceci est possible via l'option Paramètres ou le raccourci Accessibilité.

Réglage de ReSound LiNX via Réglages

Ouvrez l'appareil ReSound LiNX jumelé via le menu **Réglages > Général > Accessibilité > Appareils auditifs**. Sélectionnez avec votre doigt le nom de votre appareil auditif pour plus de fonctions.

Dans cet écran, vous accédez à des informations et vous pouvez ajuster le volume sonore et sélectionner des programmes. Si vous activez l'option Live Listen™, vous pouvez utiliser le microphone de l'appareil Apple pour recevoir et transférer des sons directement vers vos appareils auditifs.



Commander ReSound LiNX via le raccourci Accessibilité

Vous pouvez également commander vos appareils ReSound LiNX via le raccourci Accessibilité (cliquer trois fois sur le bouton de démarrage) pour modifier ainsi les programmes, le volume et autres paramètres.

Assistance supplémentaire

Pour plus d'informations ou une assistance pour le ReSound LiNX et la fonction Made For iPhone, n'hésitez pas à prendre contact avec votre audiologiste ou consultez notre page d'aide www.resound.com/linx.



ReSound LiNX est compatible avec iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (4^e génération), iPad mini avec écran Retina, iPad mini et iPod touch (5^e génération) équipé d'iOS 7.X ou d'une version plus récente.

Apple, le logo Apple, Airplay, FaceTime, Live Listen, iPhone, iPad et iPod sont des marques commerciales déposées d'Apple Inc., inscrites au registre du commerce aux États-Unis et dans d'autres pays.

